



Gesichtssauna & Inhalationsgerät

Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
2	Allgemeine Hinweise zur Behandlung mit Dampf.....	2
3	Anwendungsgebiete	2
4	Verwendung und Bedienung des Gerätes.....	3
5	Pflegehinweise.....	4
6	Sicherheitshinweise.....	4
6.1	Befragen Sie vor der Verwendung Ihren Arzt oder Apotheker	4
6.2	Sicherheitshinweise zum Umgang mit dem Gerät.....	4
7	Garantie	6



1 Einführung

Wir freuen uns, dass Sie sich für eine Gesichtssauna aus unserem Hause entschieden haben. Sie haben ein hochwertiges Gerät eines renommierten Herstellers von elektrischen Produkten erworben. Auf den folgenden Seiten finden Sie wertvolle Hinweise für den Gebrauch des Gerätes. Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch und heben sie für eventuelle spätere Fragen gut auf.

2 Allgemeine Hinweise zur Behandlung mit Dampf

Die Behandlung des Gesichts und der oberen Atemwege mit heißem Dampf kann viele positive Effekte haben. Im Bereich des Gesichts entspannt die Behandlung die Haut und kann Verunreinigungen beseitigen. Durch die Zugabe von beispielsweise Kamillenblüten können entzündete Stellen (Pickel, gesprungene Lippen oder entzündete Nasen) schneller geheilt werden. Die Atemwege können durch den Dampf befreit werden und eventuell festgesetzter Schleim wird gelöst und fließt ab. Durch die Konzentration des Dampfes auf das Gesicht bzw. die Nase werden sonst von Dampfbädern bekannte Nebenwirkungen wie verschwitzte Haare oder Oberkörper vermieden. Auch ist die Verbrennungsgefahr wie zum Beispiel an einem heißen Topf bei weitem nicht so groß. Zudem brauchen Sie durch die Konzentration auf die wesentlichen Stellen des Körpers bedeutend weniger Mengen an Zusätzen und erreichen sogar ein noch intensiveres Ergebnis als bei einem herkömmlichen Dampfbad mittels eines Topfes und eines Handtuches.

Wir empfehlen, das Gesicht vor der Verwendung der Gesichtssauna zu reinigen und eventuelles Make-up zu entfernen.

Nach der Behandlung sollten Sie das Gesicht rasch abwaschen, da der ausgetretene Schweiß Bakterien und Unreinheiten mit aus der Haut transportiert hat. Trocknen Sie es danach gut ab. Nun können Sie Ihr Gesicht mit einer entsprechenden Creme besonders gut pflegen, da die Poren durch die hohe Temperatur während der Behandlung noch weit geöffnet sind und die Creme entsprechend rasch und tief einziehen kann. Vermeiden Sie es, während der nächsten ½ Stunde ins Freie zu gehen.

3 Anwendungsgebiete

Im Bereich des Gesichtes (Kosmetische Anwendung):

- Pflege der Gesichtshaut, Öffnung und Reinigung der Poren
- Behandlung von gereizten und entzündeten Hautpartien

Im Bereich der Atemwege:

- Unterstützung bei der Behandlung von Schnupfen & Nasennebenhöhlenentzündungen sowie bei Entzündung der Bronchialschleimhäute
- Befeuchtung der Nasenschleimhäute, Lösung von festem Nasenschleim

4 Verwendung und Bedienung des Gerätes

1. Stellen Sie das Gerät auf eine feste Unterlage, zum Beispiel auf einen Tisch. Achten Sie darauf, dass das Kabel spannungsfrei bis zur Steckdose reicht und Sie sich bequem vor das Gerät setzen können.
2. Befüllen Sie den Messbecher mit warmem Wasser und geben Sie dieses in die Verdampferschale. Versuchen Sie immer nur so viel Wasser einzufüllen, wie Sie auch zur Inhalation benötigen (mehr Wasser = längere Inhalationsdauer). Das verkürzt die Vorwärmzeit erheblich.
3. Geben Sie nun eventuelle Essenzen oder Kamillenblüten hinzu. Beachten Sie die Dosierungsanleitungen des jeweiligen Herstellers. Beachten Sie, dass bedingt durch die sehr geringe Wassermenge nur eine sehr geringe Menge an Blüten bzw. Essenz benötigt wird, zum Beispiel reicht 1 Teelöffel Kamillenblüten vollkommen aus. Vermeiden Sie eine Überdosierung und verwenden Sie nur zugelassene Zusätze!
4. Setzen Sie nun den jeweiligen Aufsatz – entweder für das Gesicht oder für die Nase – auf die Verdampferschale auf. Der Nasenaufsatz muss vorher zusammengesetzt werden.
5. Stecken Sie den Stecker erst jetzt in die Steckdose, und schalten Sie das Gerät ein.
6. Nach einer Aufwärmzeit von ca. 3 – 5 Minuten (abhängig von Wassermenge und Wassertemperatur) fängt die Dampfbildung an, das Wasser in der Verdampferschale kocht jetzt.
7. Beugen Sie sich nun über den entsprechenden Aufsatz und schließen Sie Ihre Augen. Wir empfehlen, dass Sie sich einen Kurzzeitwecker stellen. Die Behandlung sollte mindestens 5 Minuten, maximal jedoch 15 Minuten lang erfolgen. Sie kann 3-mal täglich wiederholt werden. Atmen Sie tief und gleichmäßig ein. Sollte Ihnen die Temperatur des Dampfes zu heiß werden, heben Sie einfach den Kopf ein wenig an, so dass zwischen Gesicht und Aufsatz ein kleiner Spalt entsteht, durch den Sie zusätzlich kühlende Frischluft einatmen können.



Bitte schrauben Sie den Nasenaufsatz vor der Verwendung auf seinen Fuß.

5 Pflegehinweise

Die folgenden Hinweise sollten Sie beachten, um möglichst lange Freude an Ihrem Gerät zu haben.

- Setzen Sie das Gerät niemals der Feuchtigkeit aus! Achten Sie beim Befüllen der Verdampferschale darauf, kein Wasser zu vergießen. Tauchen Sie das Gerät niemals unter Wasser und spülen Sie es nicht unter fließendem Wasser ab!
- Benutzen Sie zum Reinigen der Gesichtssauna möglichst ein Mikrofasertuch, bzw. wischen Sie das Gerät außen höchstens leicht feucht ab und trocknen Sie es danach wieder ab. Die Verdampferschale können Sie mit einem feuchten Tuch auswischen. Achten Sie darauf, Rückstände von Essenzen oder Kamillenblüten rückstandsfrei zu entfernen!
- Die Gesichtsmaske und den Nasenaufsatz können Sie mit Geschirrspülwasser reinigen. Diese Teile sind nicht für den Geschirrspüler geeignet!

6 Sicherheitshinweise

6.1 Befragen Sie vor der Verwendung Ihren Arzt oder Apotheker

- bevor Sie die Zusätze oder Essenzen für die Inhalation verwenden
- bei Fieber oder ständigem Hustenreiz
- bei stirnseitiger Nebenhöhlenentzündung
- bei Beschwerden mit ungeklärter Ursache
- bei Hautverletzungen oder -erkrankungen im Gesichtsbereich oder im Nasen- oder Rachenraum
- beim Auftreten von Schmerzen an Haut oder Schleimhäuten. In diesem Falle ist die Behandlung sofort abzubrechen! Kühlen Sie die betroffenen Hautpartien gegebenenfalls.

Wichtige Hinweise:

Lassen Sie **niemals Kinder** unbeaufsichtigt mit dem elektrischen Gerät alleine hantieren, da Kinder die Gefahren, die von solchen Geräten ausgehen, nicht erkennen können.

Achten Sie unbedingt darauf, das Sie während des Betriebes **nicht an das Gerät stoßen**, da das Wasser in der Verdampferschale eine Temperatur von 100 °C erreicht und Sie sich daran schwere Verbrennungen zufügen könnten.

Verwenden Sie GRUNDSÄTZLICH nur Zusätze, die speziell für die Verwendung in einer Gesichtssauna mit siedendem bzw. kochendem Wasser zugelassen sind! Ansonsten kann erhebliche Verbrühungsgefahr bestehen! Fragen Sie im Zweifel unbedingt vorher einen Arzt!

6.2 Sicherheitshinweise zum Umgang mit dem Gerät

- Verwenden Sie den Apparat nur für den Zweck, zu dem er in dieser Bedienungsanleitung bestimmt ist! Verwenden Sie kein fremdes Zubehör!
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine flache, ebene und feste Unterlage! Weiche Unterlagen wie z.B. Teppiche, Handtücher oder Betten sind nicht geeignet!

- Verwenden Sie es nie an schlafenden Personen!
- Es darf kein Gegenstand in irgendeine Öffnung eingeführt werden!
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung im Außenbereich zugelassen! Verwenden Sie es nicht in Räumen, wo Spraydosen verwendet werden oder Sauerstoff verabreicht wird.
- Das Gerät wird mit 230 Volt Wechselstrom betrieben. Schließen Sie es nur an entsprechende Steckdosen an!
- Stecker und Zuleitung müssen immer trocken bleiben!
- Ziehen Sie die Anschlussleitung nie über scharfe Kanten, klemmen Sie sie nicht ein und schützen Sie sie vor Hitze und anderen schädlichen Umwelteinflüssen!
- Bitte überprüfen Sie die Zuleitung regelmäßig auf Schäden! Sollte eine Reparatur notwendig sein, wenden Sie sich unbedingt an den Hersteller oder eine geeignete, qualifizierte Person!
- Ziehen Sie den Stecker bei Nicht-Benutzung immer aus der Steckdose! Fassen Sie dabei unbedingt direkt am Stecker an, niemals an der Leitung!
- Benutzen Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wasser (z.B. Waschbecken) oder in der Nähe von Herdplatten oder offenem Feuer.
- Vermeiden Sie eine Verwendung auf wasserempfindlichen Oberflächen! Diese können durch austretenden Dampf oder Wasserspritzer beschädigt werden!
- Richten Sie den heißen Dampf nicht gegen die Augen oder andere hitzeempfindliche Zonen. Halten Sie Ihre Augen immer geschlossen, wenn Sie das Gerät benutzen!
- Beim Verschütten von heißer Flüssigkeit bei der Benutzung können Sie sich verbrühen. Kühlen Sie betroffene Hautpartien sofort!
- Schalten Sie das Gerät nur mit gefüllter Verdampferschale ein. Füllen Sie immer zuerst das Wasser und danach die Zusätze ein! Füllen Sie niemals mehr Wasser ein, als die „max“-Markierung des Messbechers zeigt! Schließen Sie das Gerät erst nach dem Befüllen an das Stromnetz an!
- Unterbrechen Sie die Stromzufuhr, bevor Sie das restliche Wasser aus dem Gerät schütten!
- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Aufsicht. Lassen Sie niemals Kinder unbeaufsichtigt mit dem Gerät!
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn
 - Gerät oder Zuleitung beschädigt sind
 - ein Verdacht auf Defekt nach einem Sturz o.ä. besteht
- Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn
 - Störungen während des Betriebes auftreten
 - Sie das Gerät reinigen möchten
 - Sie das Gerät nicht mehr benötigen
- Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt!

Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung wurde sorgfältig erstellt und auf Richtigkeit der Inhalte geprüft. Sollten wider Erwarten dennoch Fehler enthalten sein, lässt sich daraus kein Reklamationsgrund für das Gerät ableiten.

Die Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung, auch in Auszügen, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung untersagt.

Copyright © 2003, MILLENNIUM 2000 GmbH, München

Besuchen Sie uns im Internet: www.millennium2000.de

7 Garantie

Sie haben ein Qualitätsprodukt eines renommierten Herstellers für elektronische Geräte erworben. Hierfür gelten die gesetzliche Gewährleistung von 24 Monaten sowie die nachstehenden Garantiebedingungen.

1. Wir beheben unentgeltlich Schäden oder Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Fabrikationsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb der Garantiezeit gemeldet werden.
2. Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Batterien sowie leicht zerbrechliche Teile, wie z.B. Glas oder Kunststoff. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von Produktbeschreibungen, die für Wert oder Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen, elektrochemischen oder Wasser-Einwirkungen, sowie allgemein aus anormalen äußeren Bedingungen.
3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Reklamierte Geräte sind der Kaufstelle zu übergeben oder – **ordnungsgemäß freigemacht und möglichst in der schützenden Originalverpackung** – an die Servicestelle einzusenden. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Bitte beachten Sie: Das Porto ist nicht Bestandteil der Produktgarantie!
4. Bei Zweckentfremdung, Fehlbedienung oder nicht fachgerechter Reparatur wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen. Garantieleistungen sind in solchen Fällen ausgeschlossen.
5. Bei Reklamationen ist grundsätzlich der Kaufbeleg mit Kauf- oder Lieferdatum vorzulegen bzw. einzusenden.
6. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von nicht autorisierten Personen vorgenommen werden.
7. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Gewährleistungsfrist, noch setzen sie eine neue Frist in Lauf. Die Gewährleistungsfrist für eingebaute Ersatzteile endet mit derjenigen für das ganze Gerät.
8. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, sind – soweit nicht durch gesetzliche Regelungen begründet – ausgeschlossen. Bitte beachten Sie hierzu auch die Hinweise in dieser Bedienungsanleitung!
9. Bitte senden Sie Ihr Gerät nur dann an die nachstehende Service-Adresse ein, wenn es wirklich nicht funktionsfähig ist.

**MILLENNIUM 2000 GmbH • Hegener & Weiner
Service-Abteilung • Liebigstr. 28 • D-80538 München**

Falls lediglich etwas fehlen sollte oder Sie Probleme bei der Bedienung haben, dann wenden Sie sich bitte an die Service-Adresse oder unsere Hotline.

10. Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, ein defektes Gerät an diese Adresse zu senden; Überprüfungen und Reparaturen nach Ablauf der Garantiezeit sind kostenpflichtig.
11. Falls im Zusammenhang mit der Bedienung des Gerätes irgendwelche Fragen auftauchen sollten, welche Sie in der Bedienungsanleitung nicht ausreichend beantwortet finden, dann können Sie sich gerne Montag bis Freitag zwischen 09.00 und 17.00 Uhr telefonisch an unsere **Service-Hotline** wenden:

MILLENNIUM Hotline-Nummer:  (089) 2916 0080